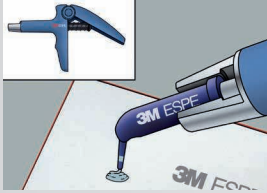
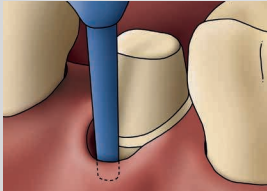
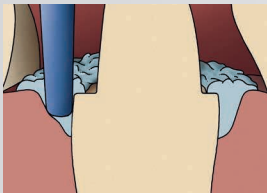



# Anwendung von 3M™ ESPE™ Adstringierende Retraktionspaste


## Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen sauberen und trockenen Arbeitsbereich


- 

Die Retraktionskapsel in einen handelsüblichen Composite-Dispenser einlegen und den festen Sitz der Retraktionskapsel prüfen. Ziehen Sie dafür die Kapsel im Dispenser etwas nach vorne bis sie einrastet. Anschließend eine kleine Menge Paste ausbringen und verwerfen.
- 

Die Kapselspitze in den Sulkus einführen. Die Retraction des Gewebes erfolgt mechanisch
- 

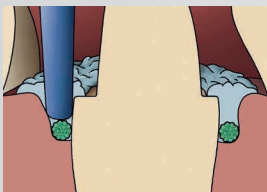Die Kapselspitze im Sulkus langsam und gleichmäßig um den Zahn herum führen, dabei die Paste ausdrücken und den Sulkus mit so viel Retraktionspaste füllen, dass ein Überschuss heraus quillt.
- 

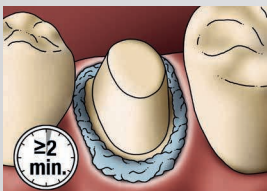**OPTIONAL: ANWENDUNG MIT FÄDEN**  
Sollte es die klinische Situation erfordern, kann die Retraktionspaste zur weiteren Sulcusöffnung mit einem Faden kombiniert werden.
- 

Die adstringierende Retraktionspaste mindestens 2 Minuten im Sulkus einwirken lassen.
- 

Die adstringierende Retraktionspaste nach der Einwirkzeit mit einem Luft-Wasser-Gemisch und mit Hilfe einer Absaugung vollständig entfernen.



Einzelheiten zur klinischen Anwendung werden  
in unserem Video dargestellt.